

NEBULIZADOR MULTIFUNCIONAL (HIDRATANTE OCULAR)


INSTRUCCIONES DE USO



Gracias por comprar este producto.

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto y guárdelo en un lugar seguro.

PARTES DEL PRODUCTO

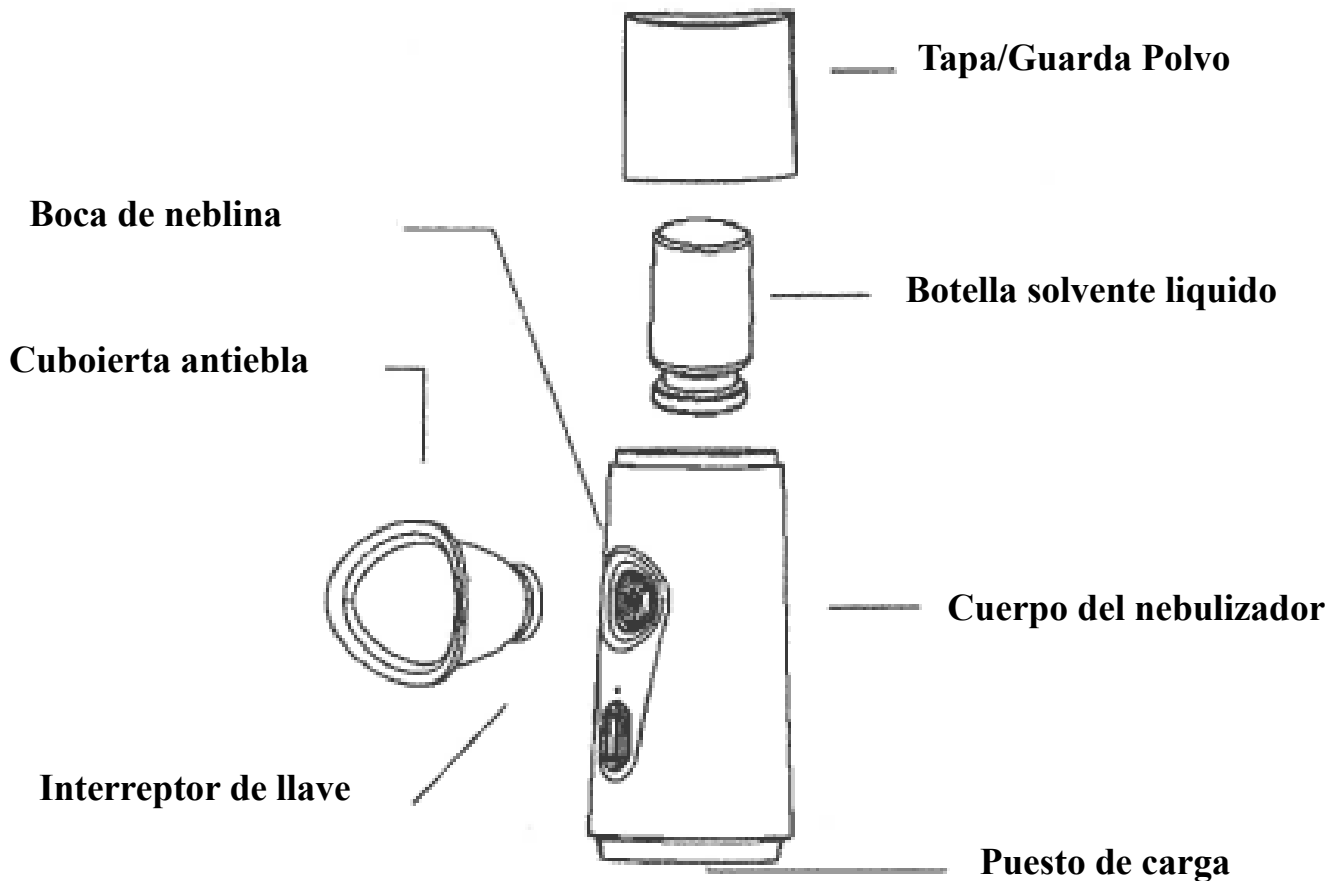

INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN:

El nebulizador multifuncional (hidratante ocular) es un nuevo tipo de instrumento que utiliza tecnología de atomización sónica para transformar las soluciones oftálmicas, pasando del goteo tradicional a la atomización. Los métodos de goteo convencionales suelen presentar problemas de dosificación imprecisa y penetración insuficiente.


El nebulizador atomiza la solución oftálmica en moléculas ultrafinas, lo que resulta en una mayor y más uniforme penetración y una mejor absorción. Además, su funcionamiento con un solo botón es muy sencillo, lo que representa una importante innovación tecnológica en el cuidado ocular.

Es fácil de usar, ya que el líquido no está expuesto al aire ni al ambiente exterior. Se instala una botella a la vez y el líquido se reemplaza inmediatamente después de su uso.

CÓMO UTILIZAR:


- Abra la tapa protectora del instrumento, abra el frasco de líquido, invierta el instrumento, instale el frasco de líquido, luego dele la vuelta y vuelva a montarlo.
- Instale la cubierta antipolvo y la cubierta antiempañamiento, y luego encienda la máquina para que atomice.
- Dirige la boquilla hacia tus ojos y coloca la mascarilla nebulizadora a una distancia cómoda alrededor de ellos. Rocía durante 10 segundos en cada ojo.
- Repita el procedimiento en el otro ojo, rociando cada ojo de 3 a 4 veces.
- Después de usarla, si es necesario limpiarla, la máscara para ojos se puede quitar para lavarla. Tras lavarla y secarla, se puede volver a colocar en su sitio. El cuerpo de la máquina no es impermeable, por lo que no se debe lavar la máquina completa.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN:

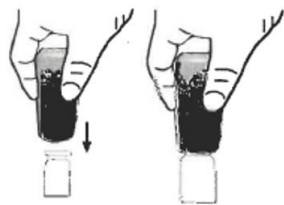

- Abra la botella de líquido, colóquela sobre la superficie e invierta el instrumento para su instalación como se muestra en el diagrama.
- Si presionas hacia abajo, conecta la abertura de la botella al instrumento y luego dale la vuelta al instrumento.

Diagrama de montaje completo.

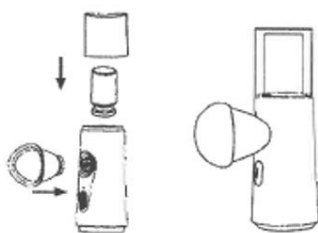

Nota: Por motivos de seguridad, el dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos de funcionamiento. Vuelva a encenderlo si necesita usarlo de nuevo.

Este instrumento solo puede utilizarse con frascos de penicilina estándar. No utilice frascos que no cumplan con las especificaciones para evitar daños.

MODO DE CARGA:

El producto emitirá una luz roja de advertencia cuando el voltaje sea bajo. Utilice el cable de carga original incluido en el paquete, conectándolo al puerto TP-C en la parte inferior del producto y luego al enchufe de la toma de corriente. No es necesario presionar ningún botón para cargar.

Para el primer uso, cargue la batería por completo. La luz roja parpadeará intermitentemente durante la carga y la luz azul permanecerá encendida cuando esté completamente cargada. El tiempo de carga es de aproximadamente 2 a 3 horas (el tiempo de carga puede variar según el modelo del cargador, lo cual es normal).

PARÁMETROS DEL PRODUCTO:

- Nombre del producto: Nebulizador multifuncional (hidratante ocular)
- Modelo: R03
- Materiales: ABS, PC, silicona
- Apertura de atomización: 4 nm/1100 kJ
- Tasa de nebulización: 0,52 ml/min
- Acoplamiento de contenedores: viales, botellas con tapón de rosca
- Especificaciones del recipiente: matraces volumétricos de 3 a 10 ml (se recomiendan de 5 a 10 ml).
- Fuente de alimentación: Batería recargable de polímero integrada
- Capacidad de la batería: 200 mA
- Conector de carga: tipo C
- Parámetros de carga: 5V/0,5A
- Duración de la batería: 40-60 minutos (funcionamiento continuo)

- Tiempo de carga: 2-3 horas
-

PRECAUCIONES DE USO:

1. Este producto funciona con batería recargable. Utilice un adaptador de corriente con interfaz USB-C compatible. Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso. No utilice el producto mientras se está cargando.
2. Para minimizar los riesgos, este producto está prohibido para su uso por bebés y niños pequeños, y debe utilizarse bajo la supervisión de los padres en el caso de menores.
3. Este producto no es resistente al agua.
4. Este producto tiene una batería incorporada. No lo arroje al fuego para evitar peligros.
5. No utilice este producto si el cable o el enchufe de carga están dañados, si el producto presenta fallas, si se cae o si entra en contacto con algún líquido. Póngase en contacto con nuestra empresa o con un centro de servicio autorizado de inmediato.
6. No coloque el producto cerca de fuentes de calor, estufas eléctricas u hornos calientes para evitar dañarlo.
7. El instrumento debe utilizarse en un entorno limpio, bien ventilado, aislado térmicamente, a prueba de humedad y polvo, libre de gases tóxicos y sustancias corrosivas. Este producto incorpora una batería de litio y debe utilizarse a una temperatura comprendida entre 5 °C y 45 °C.
8. Al reemplazar piezas del instrumento o cuando el instrumento llegue al final de su vida útil, deséchelo de acuerdo con las regulaciones nacionales sobre la eliminación de productos electrónicos para lograr el objetivo de protección del medio ambiente.
9. La boquilla del instrumento está fabricada con silicona de grado médico, que no es tóxica y no provoca reacciones alérgicas ni otros efectos adversos en los tejidos humanos.
10. Tenga en cuenta que las mascarillas para los ojos deben ser utilizadas por una sola persona a la vez y no deben compartirse para evitar infecciones bacterianas.

11. Después de usar el instrumento, limpie con alcohol la entrada de líquido y la salida de niebla de la placa atomizadora.

PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIONES:

1. Si el instrumento muestra una luz roja (batería baja), cárguelo de inmediato.
2. La luz roja parpadeará durante la carga. Si la luz no parpadea, compruebe que el puerto de carga esté bien conectado. Si la luz no se enciende, pruebe a cambiar el cable de carga.
3. El instrumento no produce niebla (las luces están encendidas y se oye un sonido de funcionamiento, pero no se produce niebla):
 - a. Compruebe si el líquido añadido cumple con las especificaciones. Si aparece niebla después de cambiar a agua limpia, significa que el líquido añadido no cumple con las especificaciones.
 - b. Después de inyectar el líquido en el instrumento, puede formarse un vacío en el puerto Wuhu, lo que impedirá la pulverización. Agítelo suavemente. El problema se puede solucionar moviendo las burbujas con el instrumento.
 - c. La boquilla es muy precisa y la obstrucción puede deberse a factores externos. En este caso, puede usar primero un hisopo de algodón humedecido en agua para limpiar la parte exterior del orificio de nebulización. Si esto no resuelve el problema, puede añadir alcohol médico al instrumento y, al mismo tiempo, usar un hisopo de algodón humedecido en alcohol para limpiar la parte exterior del orificio de nebulización.
4. Instrucciones para el uso de gotas oftálmicas. Este instrumento es una versión personalizada profesionalmente.

Utilice el producto especificado: Solución oftálmica en aerosol Jinshihui.

Consejos amables: Para el bien de su salud ocular, se recomienda utilizar este dispositivo durante un máximo de tres meses.