

NÉBULISEUR MULTIFONCTIONNEL (HYDRATANT POUR LES YEUX)


MODE D'EMPLOI



Merci d'avoir acheté ce produit.

Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit et rangez-le dans un endroit sûr.

PIÈCES DE PRODUIT

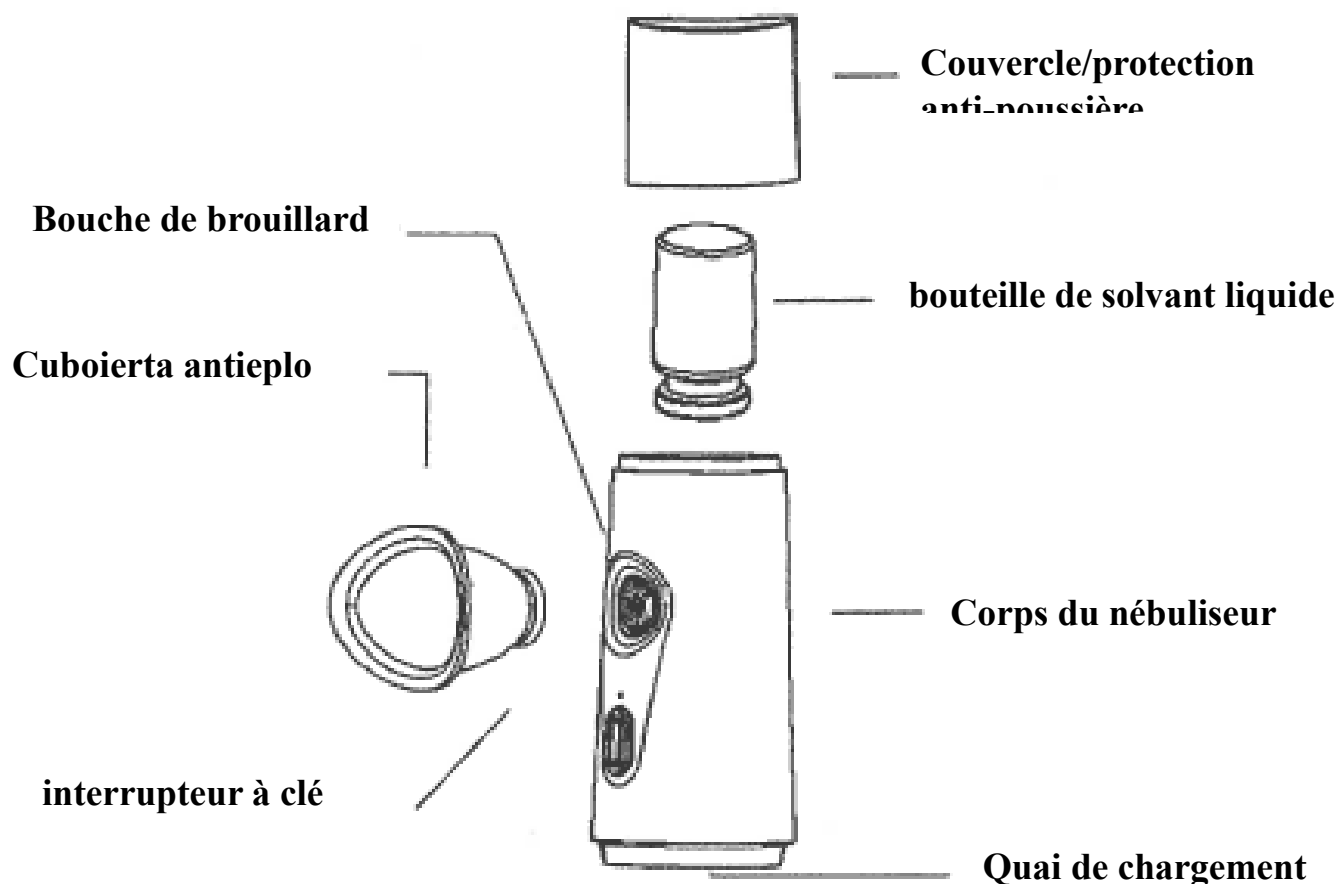

INTRODUCTION À LA FONCTION :

Le nébuleur multifonctionnel (hydratant oculaire) est un dispositif novateur qui utilise la technologie d'atomisation sonore pour transformer les solutions ophtalmiques, remplaçant ainsi l'instillation goutte à goutte traditionnelle par une atomisation. Les méthodes d'instillation classiques présentent souvent des problèmes de dosage imprécis et de pénétration insuffisante.


Le nébuleur atomise la solution ophtalmique en molécules ultrafines, ce qui permet une pénétration plus importante et plus uniforme ainsi qu'une meilleure absorption. De plus, son utilisation simplifiée par un seul bouton représente une innovation technologique majeure dans le domaine des soins oculaires.

Son utilisation est simple, car le liquide n'est pas exposé à l'air ni aux intempéries. Une seule bouteille est installée à la fois, et le liquide est remplacé immédiatement après usage.

MODE D'EMPLOI :


- Ouvrez le couvercle de protection de l'instrument, ouvrez le flacon de liquide, retournez l'instrument, installez le flacon de liquide, puis remettez-le à l'endroit et remontez-le.
- Installez le couvercle anti-poussière et le couvercle anti-buée, puis mettez l'appareil en marche pour la pulvérisation.
- Dirigez l'embout vers vos yeux et placez le masque du nébuliseur à une distance confortable autour d'eux. Pulvérisez pendant 10 secondes dans chaque œil.
- Répétez la procédure sur l'autre œil, en vaporisant chaque œil 3 à 4 fois.
- Après utilisation, si nécessaire, le masque pour les yeux peut être retiré pour être lavé. Après lavage et séchage, il peut être remis en place. Le corps de l'appareil n'étant pas étanche, il ne faut pas laver l'appareil entier.

SCHÉMA D'INSTALLATION :

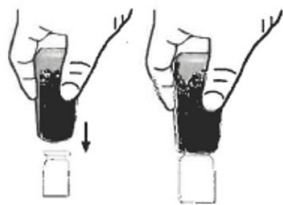

- Ouvrez le flacon de liquide, placez-le sur la surface et retournez l'instrument pour l'installation comme indiqué sur le schéma.
- Si vous appuyez, connectez l'ouverture de la bouteille à l'instrument, puis retournez l'instrument.

Schéma d'assemblage complet.

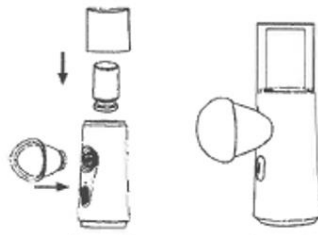

Remarque : Pour des raisons de sécurité, l'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes d'utilisation. Rallumez-le si vous souhaitez le réutiliser.

Cet instrument ne peut être utilisé qu'avec des flacons de pénicilline standard. N'utilisez pas de flacons non conformes aux spécifications afin d'éviter tout dommage.

MODE DE CHARGEMENT :

Un voyant rouge s'allume lorsque la tension est faible. Utilisez le câble de charge d'origine fourni, en le connectant au port TP-C situé sous l'appareil, puis à une prise secteur. Aucune touche n'est nécessaire pour recharger l'appareil.

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. Le voyant rouge clignote pendant la charge, puis reste allumé une fois la batterie chargée. Le temps de charge est d'environ 2 à 3 heures (il peut varier selon le modèle de chargeur, ce qui est normal).

PARAMÈTRES DU PRODUIT :

- Nom du produit : Nébuliseur multifonctionnel (Hydratant pour les yeux)
- Modèle : R03
- Matériaux : ABS, PC, silicone
- Ouverture d'atomisation : 4 nm/1100 kJ
- Débit de nébulisation : 0,52 ml/min
- Raccordement des contenants : flacons, bouteilles à bouchon à vis
- Spécifications du récipient : fioles jaugées de 3 à 10 ml (5 à 10 ml recommandés).
- Alimentation : Batterie polymère rechargeable intégrée
- Capacité de la batterie : 200 mA
- Connecteur de charge : Type C
- Paramètres de charge : 5 V/0,5 A
- Autonomie de la batterie : 40 à 60 minutes (fonctionnement continu)
- Temps de charge : 2 à 3 heures

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

1. Ce produit est alimenté par une batterie rechargeable. Utilisez un adaptateur secteur USB-C compatible. Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation. N'utilisez pas le produit pendant la charge.
2. Afin de minimiser les risques, l'utilisation de ce produit est interdite aux bébés et aux jeunes enfants, et son utilisation par les mineurs doit se faire sous la surveillance d'un adulte.
3. Ce produit n'est pas étanche.
4. Ce produit est doté d'une batterie intégrée. Ne le jetez pas au feu afin d'éviter tout danger.
5. N'utilisez pas ce produit si le câble de charge ou la prise est endommagé(e), si le produit présente un dysfonctionnement, s'il est tombé ou s'il entre en contact avec un liquide. Contactez immédiatement notre société ou un centre de service agréé.
6. Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur, de plaques électriques ou de fours chauds afin d'éviter de l'endommager.
7. L'instrument doit être utilisé dans un environnement propre, bien ventilé, isolé thermiquement, à l'abri de l'humidité et de la poussière, exempt de gaz toxiques et de substances corrosives. Ce produit intègre une batterie au lithium et doit être utilisé à une température comprise entre 5 °C et 45 °C.
8. Lors du remplacement de pièces de l'instrument ou lorsque celui-ci atteint la fin de sa durée de vie utile, éliminez-le conformément à la réglementation nationale relative à l'élimination des produits électroniques afin de contribuer à la protection de l'environnement.
9. L'embout buccal de l'instrument est fabriqué en silicone de qualité médicale, qui est non toxique et ne provoque pas de réactions allergiques ni d'autres effets indésirables sur les tissus humains.
10. Veuillez noter que les masques pour les yeux ne doivent être utilisés que par une seule personne à la fois et ne doivent pas être partagés afin d'éviter les infections bactériennes.
11. Après utilisation de l'instrument, nettoyez l'entrée de liquide et la sortie de brouillard de la plaque d'atomisation avec de l'alcool.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES ET SOLUTIONS :

1. Si l'appareil affiche un voyant rouge (batterie faible), rechargez-le immédiatement.
2. Le voyant rouge clignote pendant la charge. S'il ne clignote pas, vérifiez que le port de charge est correctement branché. S'il ne s'allume toujours pas, essayez un autre câble de charge.
3. L'instrument ne produit pas de brouillard (les voyants sont allumés et un bruit de fonctionnement se fait entendre, mais aucun brouillard n'est produit) :
 - a. Vérifiez si le liquide ajouté est conforme aux spécifications. Si de la buée apparaît après le passage à de l'eau propre, cela signifie que le liquide ajouté n'est pas conforme aux spécifications.
 - b. Après l'injection du liquide dans l'instrument, un vide peut se former dans l'orifice Wuhu, empêchant la pulvérisation. Agitez doucement l'instrument. Le problème peut être résolu en déplaçant les bulles d'air à l'aide de celui-ci.
 - c. La buse est très précise et le blocage peut être dû à des facteurs externes. Dans ce cas, commencez par nettoyer l'extérieur de l'orifice de brumisation avec un coton-tige imbibé d'eau. Si le problème persiste, versez de l'alcool à friction dans l'appareil et nettoyez simultanément l'extérieur de l'orifice de brumisation avec un coton-tige imbibé d'alcool.
4. Instructions d'utilisation des gouttes ophtalmiques. Cet instrument est une version personnalisée par un professionnel.

Utilisez le produit spécifié : Solution ophtalmique en spray Jinshihui.

Conseil amical : pour préserver la santé de vos yeux, il est recommandé d'utiliser cet appareil pendant trois mois maximum.